


電熱断尾器

製品番号 KD711

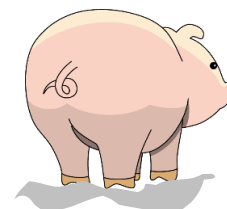

【本器の性能】

電圧 : 100V 用
200V 用
消費電力 : 80W
最高温度 : 500℃
常温加熱 : 380℃
(約3~5分)

最高温度から200℃まで下げる (約2.5分)
200℃から380℃まで上がる (約2分)

《使用説明書》

① 操作方法または使用方法

電熱断尾器で断尾するとき傷口の炎症を起こすことを防ぐことができる。使用する際、電源をコンセントに入れスイッチを入れる。3分~5分余熱してから子豚の尻尾を断尾口に挟んで尻尾を切ることができる。

② 注意事項

1. 使用する前に電圧を確認してください。使用後は、常温に冷却してから安全なところに保存してください。
2. 電源を入れてから3分~5分で使用できます。
(金具を手で触らないでください)
3. **一回の連続使用時間は20分を超えないよう**中間スイッチの入切で調整をしながら使用してください。
(取っ手の加熱防止及びに電熱線の使用寿命保持)
4. 作用中に液体で濡らさないでください。
5. 直接手で触らないように注意し、作業中は手袋をしてください。
6. 目視で電源コード、絶縁カバーに破損がある場合は直ちに使用を中止してください。
7. 使用後は、冷やしてから洗浄してください。
8. 直接水の中で洗浄しないでください。故障の原因となります。

※ ご使用に際しては、安全管理に注意してください。